


Методика калибровки Soehnle 8310.01.001

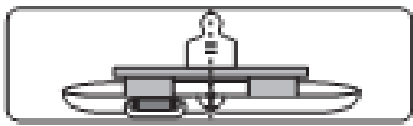

1. Снимите CE-наклейку в нижней части прибора.
2. Обеспечьте соединение между двумя видимыми контактами, а затем включите весы.
3. На дисплее отобразится знак «1 u». Нажмите на кнопку ON/OFF.
4. На дисплее появится «CAL», а затем его сменит «5,00». Положите 5кг на весы.
5. На дисплее появится «10,00», Положите 10кг на весы.
6. На дисплее появится «15,00», Положите 15кг на весы.
7. На дисплее появится «P», сигнализируют о том, что калибровка завершена.