



Одноразовый пакет для кресел-туалетов

Bag 20

Руководство по эксплуатации



СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	3
1.1 Назначение.....	3
1.2 Технические характеристики.....	3
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	3
2.1 Порядок работы.....	3
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	4
4 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....	4

1. Описание и работа

1.1 Назначение

1.1.1 Одноразовые гигиенические пакеты Barry Bag 20 являются средством по уходу, не пропускающим жидкость. Пакеты снабжены специальными абсорбирующими подушечками, которые при контакте с жидкостью превращают ее в гелеобразную массу. Пакеты оснащены завязками, затягивание которых практически полностью устраняет запах и делает легким и безопасным процесс утилизации.

Одноразовые пакеты Barry Bag 20 с абсорбирующими подушечками предназначены для безопасного сбора, транспортировки и утилизации жидкости.

1.2 Технические характеристики

- Материал пакета: полиэтилен повышенной плотности (0,04 мм)
- Размер: 60 x 40 см
- Цвет пакета: белый
- Одна абсорбирующая подушка способна превратить в гель от 400 мл до 2л жидкости*
- Количество в упаковке: 20 штук
- Вес изделия: 900 гр
- Срок хранения: 3 года от даты производства (см. на упаковке)
- Производство: Тайвань (Китай)

* в зависимости от химического состава жидкости

2. Использование по назначению

2.1 Порядок работы

1. Извлеките пакет из упаковки и поместите его в санитарное приспособление (кресло-туалет, судно, горшок, ведро).

2. Достаньте подушечку с абсорбирующим составом из алюминиевой упаковки и положите ее в пакет. Убедитесь, что подушечка с абсорбирующим составом расположена по центру.
3. Абсорбирующий вкладыш при контакте с жидкостью впитывает ее и устраняет неприятные запахи. Дождитесь, когда биоматериал превратится в гель. Этот процесс занимает считанные секунды.
4. После использования потяните пакет за две завязки, находящиеся с левой и правой стороны пакета. Завяжите узелок на пакете и утилизируйте как обыкновенный бытовой отход.
5. Перед утилизацией проверьте, чтобы пакет был полностью заполнен.

3. Техническое обслуживание

Держать в сухом, недоступном для детей месте. Избегать контакта с водой. Не смывать в унитаз после использования!

4. Условия гарантии

Гарантийный срок **6 месяцев** со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на:

- Механические повреждения
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования. Настоящая гарантия не распространяется на изделие, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил использования и/или хранения, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п.5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»)

Адрес гарантийной мастерской: г. Москва, ул. Новопоселковая, д.6
Телефон: (495) 792-31-90

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ место печати, штампа
(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектации не имею.

(покупатель Ф.И.О.)

(подпись покупателя)

Отказное письмо: №911/04-2016
от «21» апреля 2016г.

Произведено: Valentine International LTD, Тайвань (Китай),
8-th Fl, №149, Sec 2, Ta Tung Rd. 221 Hsichih City, Taipei Hsien, R.O.C

Поставщик: ООО «СИМС-2», Россия, 125363, г. Москва, ул.
Новопоселковая, д. 6