



Трости опорные:

10080, 10090,10091, 10100S, 10100/2,
10105, 10105B, 10121, 10124,
10125,10127, 10129, 10134,
10116, 10112, 10120

Насадки для тростей

Резиновая насадка для тростей:

10019, 10034, 10035, 10036, 10037

Противогололедная насадка (звездочка):

10155

Противогололедная насадка (штырь):

10155/1

Руководство по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	3
1.1 Назначение.....	3
1.2 Технические характеристики.....	3
1.3 Упаковка.....	4
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	4
2.1 Важные предупреждения.....	4
2.2 Порядок работы.....	4
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	4
4 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....	5

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик телескопических тростей: 10080, 10090, 10091, 10100S, 10100/2, 10105, 10105B, 10121, 10124, 10125, 10127, 10129, 10134, 10116, 10112, 10120.

Перед использованием, проверьте изделие на наличие повреждений.

1. Описание и работа

1.1 Назначение

Предназначен для облегчения ходьбы, путем уменьшения нагрузки на нижние конечности.

1.2 Технические характеристики

Характеристика	Описание	Артикул
материал	алюминий	все модели
рукоятка	мягкая резиновая	10100S, 10080, 10105, 10116, 10112, 10120
	двухуровневая	10100/2
	T-образная (деревянная)	10090, 10105(T), 10121
	эргономичная пластико- вая	10091, 10124, 10127, 10129
	анатомическая ручка	10125
особенность	смещенный центр тяжести	10100S, 10112
	выдвижное устройство против скольжения	10105, 10120
	для незрячих	10105B
	бесступенчатая регули- ровка высоты ручки	10129
	трость-стул	10134
производство	Тайвань (Китай)	все модели
гарантия	6 месяцев	все модели

1.3 Упаковка

Комплектация: трость, руководство по эксплуатации

2. Использование по назначению

2.1 Важные предупреждения:

- Протирайте изделие мягким моющим средством и водой, затем высушите.
- Пользователи с ограниченными возможностями или пользователи, которые не могут передвигаться самостоятельно не должны использовать данное изделие без сопровождающего лица.
- Максимальная нагрузка - 114 кг.

2.2 Порядок работы

1. Трости продаются в собранном виде.

2. При регулировании высоты трости убедитесь, что кнопочный фиксатор полностью выскочил из отверстия.

(Для того, чтобы прикрепить противогололедные наконечники (10155, 10155/1) к тростям или костылям необходимо выкрутить болты, которые находятся по бокам наконечника, присоединить наконечник к трубке трости или костыля, установить пластину-фиксатор, затянуть болты.)

3. Техническое обслуживание

Перед использованием проверьте, чтобы резиновые насадки не были порваны, изношены или утеряны. Замените насадки в случае необходимости.

4. Условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: уточняйте на сайте www.sims2.ru

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

место печати, штампа (с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)



Трости телескопические 10080, 10090, 10091, 10100S, 10100/2, 10105, 10105B, 10121, 10124, 10125, 10127, 10129, 10134, 10116, 10112, 10120.

Производитель: Valentine International ltd, Китай.

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125430, г. Москва, улица Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18

Тел./факс : (495) 792-31-90

(800) 200-31-90;

www.sims2.ru

Номер артикула	
Дата продажи	

Подпись продавца _____

МП

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

Регистрационное удостоверение Минздрава № ФСЗ 2011/09868 от 21.06.2011

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок после даты печати руководства по эксплуатации.

Фирма-производитель также не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

**Более подробная информация на сайте www.sims2.ru

Дата редакции: 22.01.2021

Для заметок

