

ТРОСТЬ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ

10080,10090,10091,10100, 10105В, 10121,10124,10127,10105,10125,10129,10134,10105,10105 T



Функциональное назначение: приспособления для реабилитации опорно-двигательного аппарата
Основные технические характеристики:

Все модели (кроме 10090ВА - сталь) тростей изготовлены из алюминиевого сплава.

Регулировка по высоте (кроме 10129 – плавная), - кнопочным замком с шагом 2,5см.

Модель 10105В-складная 4 секции, светоотражающая пленка на корпусе, длина — 150 см

Модель 10105В-складная 3 секции, светоотражающая пленка на корпусе, длина — 115 см

Модель 10121 – складные.

Модели 10105 и 10105Т - трости с выдвижным «антигололедным» наконечником, 10105Т – с т-образной ручкой.

Максимальная нагрузка: до 100кг. Для 10129,10134 – 80кг, 10090ВА – 220кг



Для того, чтобы прикрепить противогололедные наконечники (арт. 10155, 10155/1) к тростям или костылям необходимо выкрутить болты, которые находятся по бокам наконечника, присоединить наконечник к трубке трости или костыля, установить пластину-фиксатор, затянуть болты.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: г.Москва, ул.Новопоселковая, д.6,к.7 Тел:(495) 792-31-90

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

место печати, штампа

(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.)

(подпись покупателя)



Орган сертификации: рег. № РОСС RU.0001.11ИМ25, «ЭНЕРГИЯ ПЛЮС», Россия, 141075, Московская обл., г. Королев, ул. Сосновая аллея, д.6

№ сертификата: РОСС TW.ИМ25.Д05279

Срок действия: 23.06.2011 –23.06.2014

Регистрационное удостоверение: ФСЗ №2011/09868

Дата выдачи: 21.06.2011

Произведено для: Valentine International LTD, Тайвань (Китай),

8-th Fl, №149, Sec 2, Ta Tung Rd. 221 Hsichih City, Taipei Hsien, R.O.C.

Поставщик: ООО «СИМС-2», Россия, 125459, г. Москва, ул. Новопоселковая, д.6, корп. 7

ТРОСТЬ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ С КВАДРАТНОЙ ОПОРОЙ

10110, 10111, 10114, 10115

Функциональное назначение: приспособления для реабилитации опорно-двигательного аппарата

Основные технические характеристики и потребительские свойства:



Квадратная опора в данных моделях тростей служит для увеличения устойчивости и

Используется людьми с нарушенной координацией движений.

Трости регулируются по высоте через каждые **25 мм**. Надежные кнопочные замки и двойная фиксация делают регулировку легкой и безопасной.

Максимальная нагрузка – **110 кг**. (Для моделей **ВА** – 220кг)

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: г.Москва, ул.Новопоселковая, д.6,к.7 Тел:(495) 792-31-90

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____
(с расшифровкой подписи)

место печати, штампа

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.)

(подпись покупателя)



Орган сертификации: пер. № РОСС RU.0001.11ИМ25, «ЭНЕРГИЯ ПЛЮС»,
Россия, 141075, Московская обл., г. Королев, ул. Сосновая аллея, д.6

Номер сертификата: № РОСС TW.ИМ25.Д05279

Срок действия: 23.06.2011 – 23.06.2014

Регистрационное удостоверение: ФС №2011/09868

Дата выдачи: 21.06.2011

Произведено для: Valentine International LTD, Тайвань (Китай),

8-th Fl, №149, Sec 2, Ta Tung Rd. 221 Hsichih City, Taipei Hsien, R.O.C.

Поставщик: ООО «СИМС-2», Россия 125459, г. Москва, ул. Новопоселковая, д.6, корп. 7