



Ограждения на кровать

11272



Руководство по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	3
1.1 Назначение.....	3
1.2 Технические характеристики.....	3
1.3 Упаковка.....	4
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	4
2.1 Важные предупреждения.....	4
2.2 Порядок работы.....	4
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	5
4 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....	5
Приложение 1. Информационное письмо.....	7

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик ограждения на кровать 11272.


1. Описание и работа

1.1 Назначение

Ограждение на кровать 11272 служит дополнительной опорой для пользователя при изменении его положения в кровати, при вставании и тд.

1.2 Технические характеристики

цвет	хром
материал	хромированная сталь, резина
габариты (см)	41-51x90
вес изделия (кг)	2,3
производство	Тайвань (Китай)
гарантия	6 месяцев

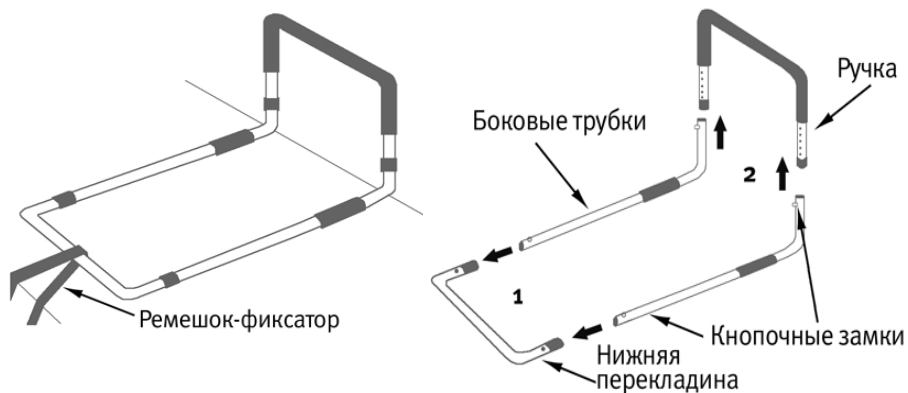

1.3 Упаковка

Комплектация: ручка - 1 шт., боковые трубки - 1 шт., нижняя перекладина - 1 шт., ремешок-фиксатор - 1 шт.

2. Использование по назначению

2.1 Важные предупреждения:

- (!) Перед началом эксплуатации, пожалуйста, проверьте все части на наличие трещин!
- (!) Убедитесь, что ограждения надежно закреплены.
- (!) Боковые ограждения могут быть повреждены при чрезмерной нагрузке.
- (!) Данное изделие служит средством поддержания равновесия и опоры для перемещения в/из кровати.
- (!) Убедитесь в надежной фиксации кнопочных замков.
- (!) Для обеспечения фиксации они должны полностью выступать из отверстий.

Максимальная нагрузка - 100 кг.

2.2 Порядок работы:

1. Установите ручку в боковые трубки до полной фиксации кнопочных замков.
2. Установите нижнюю перекладину для стабилизации в боковые трубки до полной фиксации кнопочных замков.
3. Приподнимите матрас и расположите ограждение под ним.
4. Установите ручку на желаемую высоту.

Ремешок-фиксатор.

Ремешок - фиксатор обеспечивает дополнительную стабильность, особенно для больничных и двуспальных кроватей, матрасы у которых меньше и легче.

1. Расположите ограждение под матрасом.
2. Приподнимите матрас с противоположной стороны.
3. Пропустите ремешок-фиксатор через перекладину для стабилизации и через раму кровати.
4. Надежно закрепите ремешок-фиксатор.

3. Техническое обслуживание

Уход за изделием следует проводить водой и не абразивными чистящими средствами.

Во избежание возникновения коррозии, тщательно высушите обработанную поверхность.

4. Условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: г. Москва, ул.Свободы, д.35, стр.5

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ место печати, штампа

(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Ограждения на кровать 11272

Производитель: Valentine International Ltd, Китай.

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6

Тел.: (495) 792-31-90

(800) 200-31-90;

www.sims2.ru

Серийный номер	
Дата продажи	

Подпись продавца _____

МП

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок после даты печати руководства по эксплуатации.

Фирма-производитель не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

** Более подробная информация на сайте www.sims2.ru

Приложение 1

Орган по сертификации лёгкой,
электротехнической и машиностроительной
продукции
"Лэмпромтест" ООО "СертСити"
номер аттестата аккредитации
РОСС RU.0001.11AG52

111141, г. Москва, ул. Куусковская, дом 18 б. с1
E-mail: lpt@onesert.ru
Телефон/факс: (495) 661-35-36

Исх. № 121/11-2013
от «15» ноября 2013г.

Генеральному директору
ООО «СИМС-2»
Бадалян С.П.

125363, Москва, ул. Новопоселковая, д.6

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982 (с изменениями, утвержденными Постановлениями Правительства РФ от 17.03.2010г. №148, от 17.03.2010г. №149, от 26.07.2010г. №548, от 20.10.2010г. №848, от 13.11.2010г. № 906, от 27.01.2012 N 39, от 21.03.2012 № 213, от 04.05.2012 № 435, от 18.06.2012 № 596, от 04.03.2013 № 182), а также в перечень продукции подлежащей подтверждению соответствия требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» утвержденным решением КТС от 18 октября 2011г. № 823; ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" утвержденным решением КТС от 16 августа 2011г. № 768

Не включена следующая продукция:

№ п/п	Наименование продукции	Код ТНВЭД
1	Штатив инъекционный, артикулы: 10164/4, 10164/4/S	7326909808
2	Вспомогательная ступенька, в том числе с ручкой, артикулы: 10222, 10222 Н	7326909808
3	Регулируемая опора под спину, артикул 10230Т	7326909808
4	Доска для пересадки, артикул 10460	3926909709
5	Столик-поднос для кресел-колясок (подставка для кресел-колясок на опоре), артикул 10858	3926909709
6	Держатель для ручек и карандашей, артикул 10891	3926909709
7	Ограждения на кровать, артикулы: 11270/KD, 11272, 11273P, 11888	7326909808
8	Активный захват, артикул 12405/26	7616999008
9	Надверный блочный тренажер (не электрический), артикул 24320	9506919000

Одновременно ставим Вас в известность, что «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» в дальнейшем может изменяться и дополняться. В этом случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые изменения и дополнения.

Заявленная продукция не относится к объектам обязательной сертификации ГОСТ Р, и ее обязательная сертификация в Системе сертификации ГОСТ не предусмотрена. А также не относится к объектам, соответствие которых установленным требованиям осуществляется путем принятия (продавцом) декларации о соответствии.

Руководитель ОС лёгкой, электротехнической и машиностроительной продукции



ОС «ЛЭМПРОМТЕСТ»

С. Н. Вино

/ Новгородов С.В./

Номенклатура и перечни товаров и услуг постоянно корректируются.

Данное заключение является информационным и действительно до внесения изменений в «Номенклатуру продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация» и «Номенклатуру продукции, подлежащей декларированию соответствия» или до вступления в силу технических регламентов на указанную продукцию.

Для заметок