



Трость 10113

Руководство по эксплуатации



СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	3
1.1 Назначение.....	3
1.2 Технические характеристики.....	3
1.3 Упаковка.....	3
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	3
2.1 Важные предупреждения.....	3
2.2 Порядок работы.....	4
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	4
4 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....	4
Приложение 1. Декларация о соответствии.....	6

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик трости 10113. Перед использованием, проверьте изделие на наличие повреждений.

1. описание и работа

1.1 Назначение

Складная система трости 10113 позволяет компактно размещать ее в любых местах.

1.2 Технические характеристики

складная	+
материал	алюминий
тип ручки	T-образная, резиновая
шаг регулировки высоты, см	2
регулировка по высоте, см	84-94
вес, кг	0,52
габариты, см	4x19x32,5
макс. нагрузка, кг	100

1.3 Упаковка

В комплектации: трость, руководство по эксплуатации.

2. использование по назначению

2.1 Важные предупреждения:

- Протирайте изделие мягким моющим средством и водой, затем высушите.
- Пользователи с ограниченными возможностями или пользователи, которые не могут передвигаться самостоятельно не должны использовать данное изделие без сопровождающего лица.

2.2 Порядок работы

1. Трость 10113 продается в сложенном виде в упаковке.
2. Предназначена для облегчения ходьбы, путем уменьшения нагрузки на нижние конечности.
3. Перед тем как отрегулировать высоту трости, расслабьте фиксирующее кольцо.
4. При регулировании высоты трости убедитесь, что кнопочный фиксатор полностью выскочил из отверстия.

3. техническое обслуживание

Перед использованием проверьте, чтобы резиновые насадки не были порваны, изношены или утеряны. Замените насадки в случае необходимости.

4. условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: г. Москва, ул. Свободы, д.35, стр.5

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ место печати, штампа

(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)



Трость 10113

Производитель: Valentine International ltd, Китай.

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125430, г. Москва, улица Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18

Тел.: (495) 792-31-90, (800) 200-31-90;

www.sims2.ru

Серийный номер	
Дата продажи	

Подпись продавца _____ М.П.

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

Приложение 1

1

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ООО «СИМС-2»

(Наименование организации-изготовителя, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии)

Межрайонная инспекция ФНС № 46 по г.Москве

Основной государственный регистрационный номер 1027739438902 от 02.05.2012

(Сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя: наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)
ИНН 7734197385

125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, дом 6

тел. (495) 792-31-90, факс (495) 792-31-90, info@sims2.ru

(адрес, телефон, факс)

В лице

Генерального директора Бадаляна Саргиса Павели

(Фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)

ТРОСТИ ОПОРНЫЕ: АРТ. 10080, АРТ. 10090, АРТ. 10091, АРТ. 10100/2, АРТ. 10100S, АРТ. 10105S, АРТ. 10105B, АРТ. 10120, АРТ. 10121, АРТ. 10124, АРТ. 10125, АРТ. 10127, АРТ. 10128, АРТ. 10129, АРТ. 10110, АРТ. 10111, АРТ. 10112, АРТ. 10113, АРТ. 10114, АРТ. 10115, АРТ. 10116, АРТ. 10117, АРТ. 10134

заявляет, что

Принадлежности к ТРОСТЯМ: АРТ. 10018 - РЕЗИНОВАЯ НАСАДКА ДЛЯ ТРОСТЕЙ, АРТ. 10019 - РЕЗИНОВАЯ НАСАДКА ДЛЯ ТРОСТЕЙ, АРТ. 10034 - РЕЗИНОВАЯ НАСАДКА ДЛЯ ТРОСТЕЙ, АРТ. 10035 - РЕЗИНОВАЯ НАСАДКА ДЛЯ ТРОСТЕЙ, АРТ. 10036 - РЕЗИНОВАЯ НАСАДКА ДЛЯ ТРОСТЕЙ, АРТ. 10037 - РЕЗИНОВАЯ НАСАДКА ДЛЯ ТРОСТЕЙ, АРТ. 10150 - РЕЗИНОВАЯ НАСАДКА ДЛЯ ТРОСТЕЙ, АРТ. 10151 - РЕЗИНОВАЯ НАСАДКА ДЛЯ ТРОСТЕЙ, АРТ. 10155 - ПРОТИВОГОЛОДЕДНАЯ НАСАДКА (ЗВЕЗДОЧКА), АРТ. 10155/1 - ПРОТИВОГОЛОДЕДНАЯ НАСАДКА (ШТЫРЬ), АРТ. 10158 - ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ТРОСТИ

Изготовитель продукции: VALENTINE INTERNATIONAL LTD (ВАЛЕНТАЙН ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД),

8TH FLOOR, No 149, SEC. 2, TA TUNG RD. 221, HSICHIN CITY, TAIPEI HSIEN, Тайвань (КИТАЙ)

ЗАВОДЫ:

- ZHONGSHAN GENTRY HARDWARE PRODUCTS Co. LTD., №152 WU FU ROAD, HSEIN YIN INDUSTRIAL AREA, TAINAN HSIEN, CHINA (КИТАЙ)

- ST. YORK ENTERPRISE Co., LTD, №12, LANE 300, GUANGDE RD, TAIPING CITY, TAICHUNG COUNTRY, TAIWAN, CHINA (КИТАЙ)

- FOSHAN NANHAI R. POON MEDICAL PRODUCTS Co. LTD, NEW CITY DISTRICT. DANZAO, NANHAI, FOSHAN, GUANGDONG, CHINA (КИТАЙ)

Код ОК 005 (ОКП) 939670 Код ТН ВЭД СНГ 6602000000

(Наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация, код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД СНГ)

Серийный выпуск

(Сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора, накладная, наименование изготовителя и т.п.))

ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009, ГОСТ ISO 10993-5-2011,

соответствует требованиям

ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 51632-2000,

ГОСТ Р 52285-2004

(Обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией с указанием пунктов, содержащих требования для данной продукции)

Декларация принята на основании

протоколов испытаний: №№ 1665.014, 1664.014, 1663.014 от 15.05.2014 ИЛ ФГБУН НИИ ФХМ ФМБА России (№ РОСС RU.0001.21ИМ33);

№№ 1127/14, 1126/14 от 16.05.2014 ИЦП ООО "ПСА" (РОСС RU.0001.21ИМ54)

регистрационное удостоверение Росздравнадзора № ФСЗ 2011/09868 от 21.06.2011

(Информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

Дата принятия декларации

09.06.2014

Декларация о соответствии действительна до 08.06.2019



(Подпись)

С.П.Бадалян

(Инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро- машиностроительной продукции» (ООО «ЭЛМАШ»)

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11МЕ77.

141400 ХИМКИ Московской области, ул. Ленинградская, 29

Тел. (495)7812587, факс (495)7812588, e-mail: oc@anogemc.ru

(Наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию)

№ РОСС ТW.МЕ77.Д00349 от 10.06.2014

(Дата регистрации и регистрационный номер декларации)



М.П.

(Подпись)

Д.А.Дружинин

(Инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)

Для заметок