



Костыли подмышечные
10021/P



Руководство по эксплуатации

www.sims2.ru

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	3
1.1 Назначение.....	3
1.2 Технические характеристики.....	3
1.3 Упаковка.....	3
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	3
2.1 Важные предупреждения.....	4
2.2 Порядок работы.....	4
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	6
4 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....	6
Приложение 1. Декларация о соответствии.....	8

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик костылей подмышечных Barry 10021/P.

Перед использованием, проверьте изделие на наличие повреждений.

1. описание и работа

1.1 Назначение

Костыли подмышечные Barry 10021/P предназначены для облегчения ходьбы, путем уменьшения нагрузки на нижние конечности.

1.2 Технические характеристики

складная	+
материал	алюминий; подмышечный валик, валик для кисти и насадка резиновые
шаг регулировки высоты, см	2,5
рукоятка	мягкая, регулируется по высоте
валик	мягкий, регулируется по высоте
вес, кг	2
особенность	3 размера в 1
макс. нагрузка, кг	115
гарантия	6 мес.

1.3 Упаковка

В комплектации: одна пара костылей, руководство по эксплуатации.

2. использование по назначению

2.1 Важные предупреждения:

- Протирайте изделие мягким моющим средством и водой, затем высушите.

- Пользователи с ограниченными возможностями или пользователи, которые не могут передвигаться самостоятельно не должны использовать данное изделие без сопровождающего лица.

2.2 Порядок работы

1. Нажмите на медную кнопку.



2. Прокрутите нижнюю часть костыля так, чтобы медные кнопки не попали в пазы, и вытащите ножку костыля.



3. Раскрывайте основание костыля.



4. Нажмите на медную кнопку и опустите верхнюю часть костыля



4

5. Вставьте ножку костыля с насадкой.



5

6. С помощью кнопок настройте верхнюю и нижнюю части костыля.



6

Складная система костылей Barry 10021/P позволяет компактно размещать костили в автомобиле, под столом, в ресторане, в самолете. Просто потяните две части костиля и сложите их. Универсальная система позволяет отрегулировать костиль под рост, как взрослого человека, так и подростка.

3. техническое обслуживание

Перед использованием проверьте, чтобы резиновые насадки не были порваны, изношены или утеряны. Замените насадки в случае необходимости.

4. условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при представлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантойной мастерской: г. Москва, ул. Свободы, д.35, стр.5

Серийный №_____

Дата продажи_____

Подпись продавца_____ место печати,
штампа

(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)



Костыли подмышечные Barry 10021/P
Производитель: Valentine International ltd, Китай.

Поставщик: ООО «СИМС-2»
125430, г. Москва, улица Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18
Тел.: (495) 792-31-90, (800) 200-31-90;
www.sims2.ru

Серийный номер	
Дата продажи	

Подпись продавца _____ МП

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в
моем присутствии и находится в рабочем состоянии.
Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок после даты печати руководства по эксплуатации. Фирма-производитель также не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

* *Более подробная информация на сайте www.sims2.ru

Приложение 1

1 ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ООО «СИМС-2»

(Наименование организации-изготовителя, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии)

Межрайонная инспекция ФНС № 46 по г. Москве

Основной государственный регистрационный номер 1027739438902 от 02.05.2012

(Сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя: наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер ИНН 7734197385

125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, дом 6
тел. (495) 792-31-90, факс (495) 792-31-90, info@sims2.ru

(адрес, телефон, факс)

в лице Генерального директора Бадалян Саргиса Павели

(Фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)

- заявляет, что
1. Костыли подмышечные: арт. 10021, арт. 10021/CH, арт. 10021/P, арт. 10021/U, арт. 10022, арт. 10022/U, арт. 10022-BA, арт. 10023, арт. 10023/U, арт. 10023-BA;
 2. Костыли локтевые: арт. 10071, арт. 10072, арт. 10073, арт. 10074, арт. 10074/U, арт. 10075, арт. 10075/U, арт. 10076, арт. 10076/U, арт. 10079, арт. 10079/U, арт. 10081;
 3. Принадлежности к костылям: арт. 10050 - Резиновые подмышечные валики 19 см., арт. 10060 – Резиновые валики для кисти 10 см., арт. 10030 - Резиновая насадка для костылей арт. 10031 - Резиновая насадка для костылей, арт. 10032 - Резиновая насадка для костылей, арт. 10033 - Резиновая насадка для костылей.

Изготовитель продукции: VALENTINE ANL LTD. (ВАЛЕНТИН ИНТЕРНЕЙШЛ ЛТД),

8TH FLOOR, NO 149, SEC. 2, TA TUNG RD. 221, HSICHLN CITY, TAIPEI HSIEN, Тайвань (Китай), заводы:

- ZHONGSHAN GENTRY HARDWARE PRODUCTS CO. LTD., №152 WU FU ROAD, HSEIN YIN INDUSTRIAL AREA, TAINAN HSIEN, CHINA (Китай)

- ST. YORK ENTERPRISE CO., LTD., №12, LANE 300, GUANGDE RD, TAIPING CITY, TAICHUNG COUNTRY, TAIWAN, CHINA (Китай)

- FOSHAN NANHAI R. POON MEDICAL PRODUCTS CO. LTD, NEW CITY DISTRICT. DANZAO, NANHAI, FOSHAN, GUANGDONG, CHINA (Китай)

Код ОК 005 (ОКП) 93 9670 Код ТН ВЭД СНГ 9021 10 100 0

(Наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация, код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД СНГ)

Серийный выпуск

(Сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора, накладная, наименование изготовителя и т.п.))

ГОСТ Р ИСО 11334-1-2010, ГОСТ Р 51632-2000,

соответствует требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009, ГОСТ ISO 10993-5-2011,
ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011

(Обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией с указанием пунктов, содержащих требования для данной продукции.)

Декларация принята на основании

протоколов испытаний: №№ 1688.014, 1687.014 от 19.05.2014 ИЛ ФГБУН НИИ ФХМ ФМБА России
(№ РОСС RU.0001.21ИМ33);

№№ 1128/14, 1129/14 от 16.05.2014 ИЦП ООО "ПСА" (РОСС RU.0001.21ИМ54)

регистрационное удостоверение Росздравнадзора № ФСЗ 2011/09872 от 21.06.2011

(Информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

Дата принятия декларации 16.05.2014 Декларация о соответствии действительна до 15.05.2019



(Подпись)

С.П.Бадалян

(Инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Центр по сертификации, стандартизации
и систем качества электро- машиностроительной продукции» (ООО «ЭЛМАШ»)

Аттестат акредитации № РОСС RU.0001.11МЕ77.

141400 ХИМКИ Московской области, ул. Ленинградская, 29

Тел. (495)7812587, факс (495)7812588, e-mail: oc@anogremc.ru

(Наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию)

№ РОСС TW.ME77.Д00350 от 16.05.2014

(Дата регистрации и регистрационный номер декларации)



(Подпись)

Д.А.Дружинин

(Инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)

Для заметок