



Средства для самообслуживания и ухода за инвалидами серии BS:

Сидения для ванн: BS Standart, BS Twist.
Стулья для ванн: BS Seat, BS Bench.



Руководство по эксплуатации

www.sims2.ru

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	3
1.1 Назначение.....	3
1.2 Технические характеристики.....	3
1.3 Упаковка.....	5
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	5
2.1 Важные предупреждения.....	5
2.2 Порядок работы.....	5
3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	6
4 .УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....	7

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик стульев и сидений для ванн BS Bench, BS Seat, BS Standart, BS Twist.

Перед использованием, проверьте изделие на наличие повреждений.

1. Описание и работа

1.1 Назначение

Стулья и сиденья для ванн помогают людям с нарушенной координацией движения более удобно принимать водные процедуры, полностью безопасны и комфортны.

1.2 Технические характеристики

Стул для ванны BS Bench.

- Алюминиевый каркас с порошковым напылением, устойчив к коррозии.
- Возможность установки в различные по ширине ванны.
- Сиденье изготовлено из гигиенического, ударопрочного пластика.
- Сиденье и спинка имеют отверстия для отвода воды.
- Регулируемая высота сиденья.
- Ножки для установки на ванну с противоскользящими наконечниками.
- Широкое сиденье для удобной пересадки в ванну или душевую.
- Съёмная спинка с возможностью перестановки для пересадки.
- Съёмный поручень.
- Производство: Китай, Армения.
- Гарантия: 6 месяцев.

Стул для ванны BS Seat.

- С U-образным гигиеническим вырезом.
- Каркас изготовлен из анодированного алюминия, устойчив к коррозии.
- Сиденье и спинка изготовлены из гигиенического, ударопрочного пластика.
- Сиденье имеет отверстия для отвода воды.
- Ножки для установки на ванну с противоскользящими наконечниками.
- Регулируемая высота сиденья.
- Производство: Китай, Армения.
- Гарантия: 6 месяцев.

Сиденье для ванны BS Standart.

- Каркас изготовлен из алюминия с порошковым напылением.
- Сиденье изготовлено из гигиенического, ударопрочного пластика.
- Сиденье имеет отверстия для отвода воды.
- Высота сиденья - 22 см относительно высоты края ванны.
- Ножки с противоскользящими наконечниками.
- Производство: Китай, Армения.
- Гарантия: 6 месяцев.

Сиденье для ванн BS Twist.

- С поворотным механизмом для удобной пересадки.
- Каркас изготовлен из анодированного алюминия.
- Сиденье и спинка изготовлены из гигиенического, ударопрочного пластика.
- Сиденье и спинка имеют отверстия для отвода воды.
- Сиденье оснащено дополнительными противоскользящими фиксаторами.
- Ножки для установки на края ванны с противоскользящими наконечниками.
- Шаг поворота вокруг оси: 90°
- Производство: Китай, Армения.
- Гарантия: 6 месяцев.

1.3 Упаковка

В комплектации: сиденье, ножки (кроме BS Twist, BS Standart), спинка (кроме BS Twist, BS Standart), руководство по эксплуатации.

2. Использование по назначению

2.1 Важные предупреждения:

- Протирайте изделие мягким моющим средством и водой, затем высушите.
- Убедитесь, что все ножки надежно закреплены.
- Максимальная нагрузка на стул не должна превышать 115 кг.

2.2 Порядок работы:

BS Seat

1. Проверьте все детали.
2. Соберите ножки изделия.
3. Присоедините ножки изделия к раме сиденья.
4. Прикрепите спинку к сиденью.

BS Twist

1. Поставьте изделие на ванну, рама изделия должна опираться на обе стороны ванны, держите изделие в равновесии.
2. Завинтите удерживающие рейки. Убедитесь, что они находятся напротив стенок ванны. Изделие должно быть прочно зафиксировано.
3. Если вы хотите поменять направление сиденья, необходимо поднять или опустить подъемный рычаг, а затем повернуть сиденье, куда вам необходимо.

BS Standart

1. Поставьте сиденье на ванну и убедитесь, что оно плотно держится за ванну, трубы должны опираться на обе стороны ванны.

BS Bench

1. Поставьте ножки изделия на пол ровно. Убедитесь, что отверстия на ножках находятся на одинаковом уровне.
2. Зафиксируйте ручки стула винтами.
3. Установите раму сиденья между ножками и зафиксируйте длинными винтами.

4. Повторите те же действия с другой стороной.
5. Прикрепите спинку к раме спинки с помощью длинного винта.
6. Поставьте изделие на стол для того, чтобы собрать сиденье. Затяните винты. Отверстия, находящиеся дальше всего от ножек сиденья должны быть затянуты короткими винтами.
7. Соедините раму спинки с рамой сиденья с помощью длинных винтов.

3. Техническое обслуживание

Перед использованием проверьте, чтобы резиновые насадки не были порваны, изношены или утеряны. Замените насадки в случае необходимости.

4. Условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: уточняйте на сайте www.sims2.ru

Артикул № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ место печати, штампа
(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)

Средства для самообслуживания и ухода за инвалидами серии BS

Производитель: Гуандун Дайанг Медикал Технолodge Ко., Лтд., Китай.

Место производства: Гуандун Дайанг Медикал Технолodge Ко., Лтд., Китай.

ARIDES LLC. (ООО «АРИДЕС»), Армения.

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125430, г. Москва, улица Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18

Тел.: (495) 792-31-90; (800) 200-31-90;

www.sims2.ru



Артикул №	
Дата продажи	

Подпись продавца _____ МП

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок после даты печати руководства по эксплуатации.

Фирма-производитель также не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

**Более подробная информация на сайте www.sims2.ru

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/ 10857 от 17.09.2019