

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Медицинский массажер безопасен и прост в использовании
- Обеспечивает безболезненный и эффективный массаж
- Имеет устойчивый терапевтический эффект
- Снимает тяжесть и напряжение мышц, улучшая циркуляцию крови и стимулируя иммунитет
- Эффективен при болях в спине, мышечных болях, жировых отложениях в проблемных местах

ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Волны инфракрасного излучения являются естественными и безопасными для человека. Благодаря точно сконструированному излучателю, эти волны проникают в тело человека, передавая организму тепловую энергию. Проникновение инфракрасных волн в тело прогревает ткани, мышцы и суставы, ускоряет циркуляцию крови. Излучаемое лампой тепло усиливает благотворное воздействие массажа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник питания	От сети переменного тока 220 В (50 Гц)	
Мощность	20 Вт	
Скорость вибрации	Режим «I»: 3 400 ± 34 уд./мин Режим «II»: 6 000 ± 60 уд./мин	
Вес	1 400 г	
Размеры	135 x 380 x 145 мм	
Условия эксплуатации	эксплуатации	хранения
Температура	От +10°C до +40°C	От -10°C до +60°C
Влажность	От 30% до 85%	От 30% до 95%

ЧИСТКА И УТИЛИЗАЦИЯ

- Перед чисткой массажера отключите прибор от сети.
 - Протирайте корпус прибора чистой тканью с добавлением мягкого чистящего средства, мыльный раствор и т.д.
- По окончании срока службы прибор подлежит отдельной утилизации. Не уничтожайте прибор вместе с неотсортированными бытовыми отходами.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Серийные номера приборов компании Эй энд Ди включают в себя дату изготовления прибора. Серийные номера имеют следующий вид: SN E1107 001491, где информативными являются выделенные цифры – 1107 11 – год производства, 07 – месяц производства.

Гарантийные сроки установлены в соответствии со статьями 470 и 471 ГК РФ и статьей 19 пункт 2 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей».

Высокое качество прибора подтверждено Регистрационным удостоверением №ФСЗ 2011/09740 от 20.06.2011.

Гарантийный срок прибора – 1 год.

Установленный производителем в соответствии с п.1 ст.5 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» срок службы (срок, в течение которого товар пригоден для эффективного использования по назначению) прибора равен 5 годам при условии, что прибор используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

Адрес изготовителя:

ICST Corporation, S-4 Tower 5-17-1 Kamiichiai, Chuou-ku, Saitama-shi, Saitama-ken, Japan
Factory in China: Vega Technologies Inc., Yang-Wu District, Da Lang Town, Dong Guan City, Guang Dong Province, China

АЙ-СИ-ЭС-ТИ КОРПОРАЙШН, С-4 Тауэр 5-17-1 Камичиай, Чуо-Ку, Сайтама-ши, Сайтама-кен, Япония
Завод в Китае: Вега Технолоджи Инк., Янг-Ву Дистрикт, Да Ланг Таун, Донг Гуан Сити, Гуанг Донг Провинс, Китай

Фирма-импортер:

ООО «Эй энд Ди РУС», 121357, Москва, ул. Вереysкая, д.17
Тел.: 8 800-200-03-80; отзывы и предложения оставляйте на www.and-rus.ru

МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ

Модель МН-102



NOZOMI
Tokyo, JAPAN

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Японская компания ICST Corporation (Ай Си Эс Ти Корпорейшн), фирма-импортер «Эй энд Ди РУС», благодарит Вас за покупку медицинского массажера, созданного на основе самых передовых технологий. Мы уверены, что оценив качество, надежность и достоинства этого прибора, Вы останетесь постоянным пользователем нашей продукции.

- Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для дальнейшего использования.
- При покупке прибора проверьте правильность заполнения гарантийной карты, в которой должны быть четко проставлены дата продажи и печать торгующей организации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

МН-102 массажер медицинский обеспечивает эффективный массаж, имеет устойчивый терапевтический эффект, снимает тяжесть и напряжение мышц, улучшая циркуляцию крови и стимулируя иммунитет. **Перед применением следует обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.**

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ПРИБОРА



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

- Прибор предназначен только для домашнего использования.
- Не допускайте никаких изменений или модернизаций. Это может вызвать нарушение нормальной работы прибора.
- Не допускайте падений или сильных ударов прибора. Это может вызвать его повреждение.
- Храните прибор в местах, недоступных для детей. Не позволяйте детям играть с прибором, чтобы избежать поражения электрическим током или травмирования.
- Не держите прибор вблизи источников высокой температуры, солнечного света и влаги.
- Избегайте сильного давления на прибор, так как это может привести к его поломке.
- Перед включением массажера убедитесь, что напряжение сети в доме соответствует напряжению, указанному на маркировке прибора.
- Отключайте массажер от сети, если Вы не пользуетесь им, а также перед чисткой.
- Отключайте прибор от сети только сухими руками.
- Отключая прибор от сети, не тяните за шнур, а держитесь за вилку.
- Для уменьшения риска повреждения прибора не подвергайте его воздействию влаги.

ВНИМАНИЕ

- **Перед началом эксплуатации массажера проконсультируйтесь с врачом.**
- Массажер не предназначен для проведения массажа головы.
- Если использование массажера доставляет Вам дискомфорт, то перед повторным массажем обратитесь к врачу.
- Не рекомендуется пользоваться массажером в том случае, если у Вас имеются повреждения или воспаления кожных покровов.
- Не рекомендуется использовать инфракрасное излучение, если у Вас чувствительная кожа, заболевания вен, опухоли, воспаление или сыпь на коже ног.
- Не используйте лампу инфракрасного излучения более 15 минут.
- Прибор имеет горячую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при обращении с прибором.

ОСТОРОЖНО! ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!



При включении и отключении прибора от сети не касайтесь вилки мокрыми руками!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

1. Установите переключатель в положение «0» и подключите прибор к сети.
 2. Выберите нужный режим и установите функциональный переключатель в положение «I» или «II».
- Для эффективного массажа рекомендуется сначала провести массаж рук, затем ног и спины.
 - Продолжительность массажа не должна превышать 4 минут для отдельной части тела и 15 минут в общем. Повторное использование прибора возможно только через 10 минут.
 - Используйте прибор не менее чем через час после принятия пищи.
 - По окончании массажа установите функциональный переключатель в положение «0».
 - Отключите прибор от сети

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИБОРА

Массаж шеи, плечевого пояса и рук

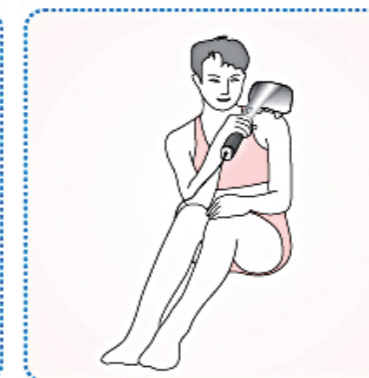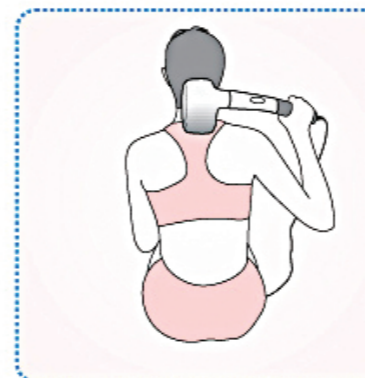

Массаж ног и ступней



Массаж спины, бедер и абдоминальной области

